

## DE Bedienungs- und Pflegeanleitung Basicline 415

### 1. Betrieb

Der Basicline 415 ist ein modern gestalteter, motorisch verstellbarer Waschtischlift. Der Lift kann mit Spiegeln bzw. Spiegelschränken kombiniert werden.

- Zum Verfahren halten Sie die jeweilige Steuertaste gedrückt.
- Zum Stoppen lassen Sie den Taster beim Erreichen der gewünschten Höhe los.

#### Pos. 1

Handtaster mit Spiralkabel

#### Pos 2.

Der Waschtischlift ist je nach Ausstattung, mit einem Klemmschutz ausgerüstet, der die Abwärtsbewegung bei Widerstand stoppt.



### 2. Wartung

Der Waschtischlift ist wartungsfrei. Abschmierungen und andere Maßnahmen sind für die gesamte Lebensdauer bereits im Werk vorgenommen worden. Aus Sicherheitsgründen müssen einige Komponenten jedoch jährlich überprüft werden.

- Inspektionen, Wartungen und Reparaturen dürfen nur von kompetenten Personen vorgenommen werden.
- Evtl. befindliche Gegenstände auf dem Lift / Waschtisch sind vor der Wartung bzw. Reparatur zu entfernen.

### 3. Funktionstest

- Fahren Sie den Lift komplett Auf und Ab. Stellen Sie sicher, dass der Lift frei von Störgeräuschen und Klemmrissen läuft. Der Lift muss in der obersten und untersten Position selbstständig stoppen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel und Schläuche unbeschädigt und nicht gequetscht sind. Es darf kein Klemmrisko entstehen.
- Fahren Sie den Lift in die Endpositionen und stellen Sie sicher, dass alle Kabel und Schläuche lang genug sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Wand- u. Waschtischbefestigungen intakt sind.
- Überprüfen Sie die Funktion des Klemmschutzes. Fahren Sie den Lift nach unten und heben Sie gleichzeitig den Waschtisch an der Vorderkante an. Der Lift muss nun stoppen.

## 4. Reinigung

Der Lift kann mit lauwarmen Wasser und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu ein weiches Tuch oder ähnliches.

Nach der Reinigung sollten Sie die Oberflächen trocken wischen, um Kalkablagerungen zu vermeiden.

**Kratzmittel und Scheuermittel wie z. B. Stahlwolle dürfen nicht verwendet werden.  
Bitte beachten Sie, dass das Produkt elektrische Komponenten enthält.**

## 5. Wartungsjournal - Wartungen & Inspektion

Order	Serial	Date
<b>Datum</b>	<b>Datum</b>	
<b>Unterschrift</b>	<b>Unterschrift</b>	
<b>Bemerkungen</b>	<b>Bemerkungen</b>	
<b>Datum</b>	<b>Datum</b>	
<b>Unterschrift</b>	<b>Unterschrift</b>	
<b>Bemerkungen</b>	<b>Bemerkungen</b>	