


# DE Bedienungs- und Pflegeanleitung Basicline 401

## 1. Betrieb

Manuell per Schraubenschlüssel höhenverstellbarer Waschtischlift. Der Lift kann in Schritten von 5 cm, um insgesamt 25 cm verstellt werden. Inkl. Spiegel und Beleuchtung.

### Höhenverstellung:

1. Lösen Sie die zwei Muttern (1).
2. Stellen Sie die gewünschte Höhe ein.
3. Stellen Sie sicher, dass der Lift richtig eingehakt ist.
4. Ziehen Sie die zwei Muttern wieder fest (1).

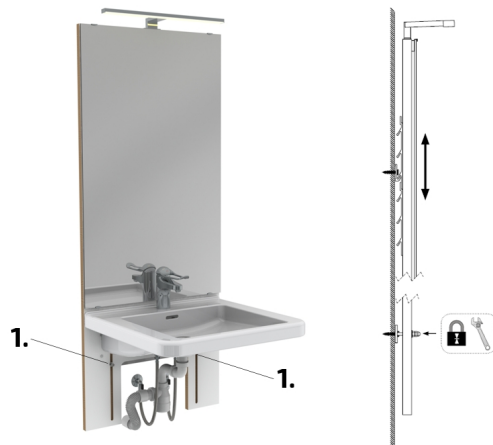

## 2. Wartung

Der Waschtischlift ist wartungsfrei. Aus Sicherheitsgründen müssen einige Komponenten jedoch jährlich überprüft werden.

- Inspektionen, Wartungen und Reparaturen dürfen nur von kompetenten Personen vorgenommen werden.
- Evtl. befindliche Gegenstände auf dem Lift / Waschtisch sind vor der Wartung bzw. Reparatur zu entfernen.

## 3. Funktionstest

- Kontrollieren Sie die Muttern auf festen Sitz.
- Stellen Sie sicher, dass alle Kabel, Wasserzu- u. Ablaufschläuche weder eingeklemmt noch gebrochen sind.
- Überprüfen Sie die Waschtischbefestigungen.
- Überprüfen Sie die die Wandbefestigungen.

## 4. Reinigung

Der Lift kann mit lauwarmen Wasser und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu ein weiches Tuch oder ähnliches.

Nach der Reinigung sollten Sie die Oberflächen trocken wischen, um Kalkablagerungen zu vermeiden.

**Kratzmittel und Scheuermittel wie z. B. Stahlwolle dürfen nicht verwendet werden.  
Bitte beachten Sie, dass das Produkt elektrische Komponenten enthält.**

## 5. Wartungsjournal - Wartungen & Inspektion

Order	Serial	Date
<b>Datum</b>	<b>Datum</b>	
<b>Unterschrift</b>	<b>Unterschrift</b>	
<b>Bemerkungen</b>	<b>Bemerkungen</b>	
<b>Datum</b>	<b>Datum</b>	
<b>Unterschrift</b>	<b>Unterschrift</b>	
<b>Bemerkungen</b>	<b>Bemerkungen</b>	