


# DE Bedienungs- und Pflegeanleitung Basicline 406

## 1. Betrieb

Manuell höhenverstellbarer Waschtischlift. Die Höhenverstellung erfolgt mit Hilfe einer Gasfeder, die die Bewegung unterstützt.

### Höhenverstellung:

1. Ziehen Sie den Sicherungsstift heraus und drehen Sie diesen um eine Viertelumdrehung (1).
2. Heben bzw. drücken Sie den Lift auf die gewünschte Höhe.
3. Drehen Sie den Sicherungsstift zum Verriegeln zurück.

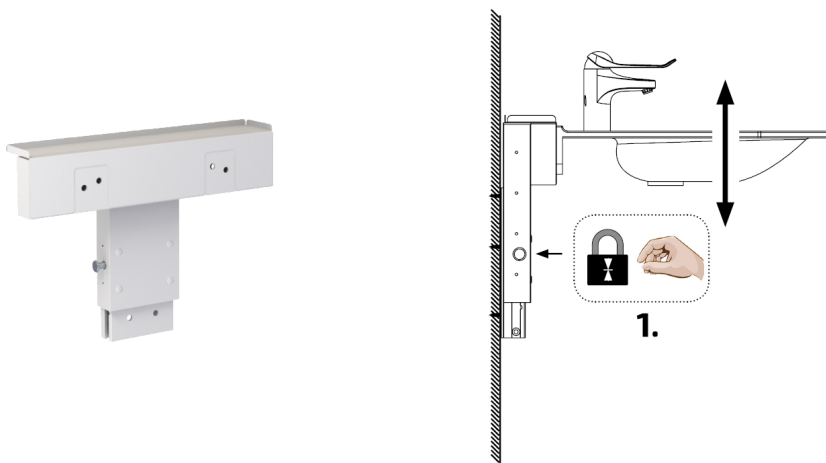

## 2. Wartung

Der Waschtischlift ist wartungsfrei. Abschmierungen und andere Maßnahmen sind für die gesamte Lebensdauer bereits im Werk vorgenommen worden. Aus Sicherheitsgründen müssen einige Komponenten jedoch jährlich überprüft werden.

- Inspektionen, Wartungen und Reparaturen dürfen nur von kompetenten Personen vorgenommen werden.
- Evtl. befindliche Gegenstände auf dem Lift / Waschtisch sind vor der Wartung bzw. Reparatur zu entfernen.

## 3. Funktionstest

- Überprüfen Sie ob der Sicherungsstift auf der gewünschten Höhe einrastet.
- Stellen Sie sicher, dass alle Wasser- u. Ablaufschläuche intakt sind und nicht gequetscht werden.
- Überprüfen Sie die Befestigung des Waschtisches.
- Überprüfen Sie die Wandbefestigungen.

## 4. Reinigung

Der Lift kann mit lauwarmen Wasser und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu ein weiches Tuch oder ähnliches.

Nach der Reinigung sollten Sie die Oberflächen trocken wischen, um Kalkablagerungen zu vermeiden.

**Kratzmittel und Scheuermittel wie z. B. Stahlwolle dürfen nicht verwendet werden.**

## 5. Wartungsjournal - Wartungen & Inspektion

Order	Serial	Date
<b>Datum</b>	<b>Datum</b>	
<b>Unterschrift</b>	<b>Unterschrift</b>	
<b>Bemerkungen</b>	<b>Bemerkungen</b>	
<b>Datum</b>	<b>Datum</b>	
<b>Unterschrift</b>	<b>Unterschrift</b>	
<b>Bemerkungen</b>	<b>Bemerkungen</b>	