

DE Bedienungs- und Pflegeanleitung Wickeltisch 333

1. Betrieb


Motorisch höhenverstellbarer Wickeltisch.

- Durch Drücken der Auf- bzw. Abtaste kann der Wickeltisch stufenlos in der Höhe verstellt werden. Die aktuelle Höhe wird im Display in cm angezeigt.
- Lassen Sie den Taster los, wenn die gewünschte Höhe erreicht ist.

Pos. 1 - Bedienpult

Speichermodi

Sie können vier unterschiedliche Arbeitshöhen einspeichern. Hierzu fahren Sie auf die gewünschte Höhe und drücken danach die Taste S und die Taste für den gewünschten Speicherort. Um zur gespeicherten Höhe zu fahren, halten Sie die gewünschte Speichertaste gedrückt. Beim Loslassen der Taste stoppt der Wickeltisch aus Sicherheitsgründen.

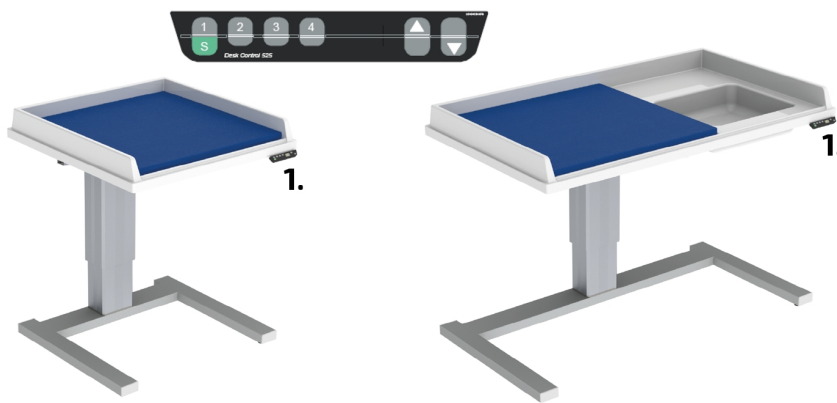

2. Wartung

Der Wickeltisch ist wartungsfrei. Abschmierungen und andere Maßnahmen sind für die gesamte Lebensdauer bereits im Werk vorgenommen worden. Aus Sicherheitsgründen müssen einige Komponenten jedoch jährlich überprüft werden.

- Inspektionen, Wartungen und Reparaturen dürfen nur von kompetenten Personen vorgenommen werden.
- Evtl. befindliche Gegenstände auf dem Wickeltisch sind vor der Wartung bzw. Reparatur zu entfernen.

3. Funktionstest

- Der Mindestabstand zu angrenzenden Wänden, Möbeln bzw. Gegenständen muss 50 mm betragen. Ansonsten besteht erhöhte Klemmgefahr.
- Überprüfen Sie die Standfestigkeit. Wenn nötig justieren Sie die höhenverstellbaren Füße.
- Fahren Sie den Wickeltisch komplett auf und ab. Er muss sich ohne Störgeräusche, Hindernisse und Quetschungen bewegen können. In den jeweiligen Endstellungen muss der Lift stehen bleiben.
- Stellen Sie sicher, dass keine Kabel beschädigt oder geklemmt sind bzw. die Gefahr des Einklemmens besteht.
- Wenn der Wickeltisch nicht die tiefste Position erreicht, muss ein Reset durchgeführt werden. Fahren Sie den Tisch hierzu möglichst weit runter. Drücken Sie nun erneut die Abwärtstaste halten Sie diese gedrückt, bis der Wickeltisch die unterste Position erreicht hat.
- Modell mit Waschbecken:
Hier sind zusätzlich die Wasserzu- u. Ablaufschläuche zu kontrollieren.

4. Reinigung

Der Lift kann mit lauwarmen Wasser und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu ein weiches Tuch oder ähnliches.

Nach der Reinigung sollten Sie die Oberflächen trocken wischen, um Kalkablagerungen zu vermeiden.

**Kratzmittel und Scheuermittel wie z. B. Stahlwolle dürfen nicht verwendet werden.
Bitte beachten Sie, dass das Produkt elektrische Komponenten enthält.**

Reinigung der ABS-Kunststoffoberfläche inkl. Becken:

Die Oberfläche ist leicht zu reinigen und hygienisch rein zu halten.

Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder ätzende Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Gerne geben wir Ihnen über geeignete Mittel Auskunft.

5. Wartungsjournal - Wartungen & Inspektion

Order	Serial	Date
Datum	Datum	
Unterschrift	Unterschrift	
Bemerkungen	Bemerkungen	
Datum	Datum	
Unterschrift	Unterschrift	
Bemerkungen	Bemerkungen	