


## **DE** Montageanleitung Wickeltisch 343

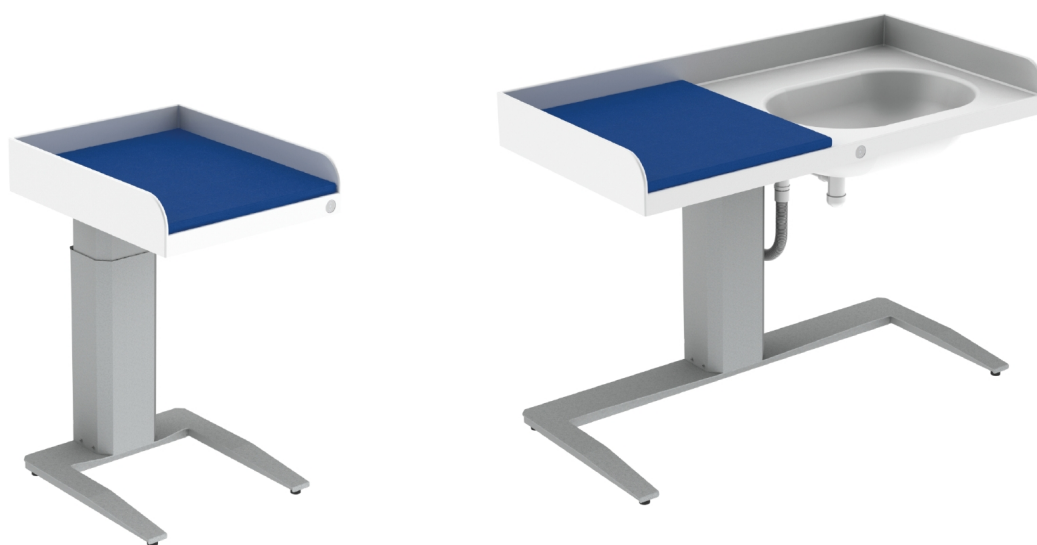

### **DE** Produkte

#### **Höhenverstellbare Pflege- und Duschliegen**


Wickeltisch 343

Wickeltisch 343 - mit Babywanne

1. Mechanischer Aufbau
2. Einzelteile
3. Elektroanschluss
4. Aufstellort
5. Funktionstest

## 1. Mechanischer Aufbau

1. Motorsäule mit integrierter Schwachstromelektronik
2. Matratze
3. Tisch aus fugenlosem Dupont™ Corian®
4. Höhenverstellbare FüÙe

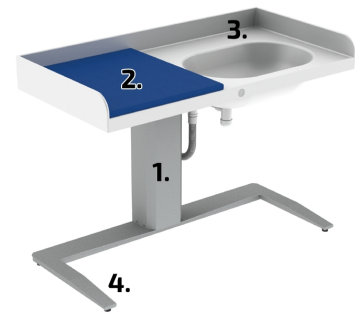

## 2. Einzelteile

Der Wickeltisch wird fertig montiert geliefert.



343



343 - mit Babywanne

## 3. Elektroanschluss

Der Lift sollte an einen Hauptschalter in Tischnähe angeschlossen werden.

Um den Tisch in Feuchträumen zu betreiben sind die einschlägigen Vorschriften für Feuchträume zu beachten. Die Stromzuführung des Motors muss geerdet sein.

Der Anschluss erfolgt über eine Steckdose 230V / 50 Hz. Die Steckdose muss so platziert sein, dass sie für Kinder nicht erreichbar ist. Hierbei ist auch der Verkehrsweg zu berücksichtigen.

Überprüfen Sie alle Kabel und Stecker auf festen Sitz. Kabel dürfen nicht gequetscht oder eingeklemmt werden.

\* Strombedarf 230 W

**Der Elektroanschluss darf nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden!**

## 4. Aufstellort

Die Wickeltisch 343 dürfen nur in Räumen mit Bodenablauf betrieben werden.

Stellen Sie den Tisch an einem Ort auf, an dem Klemmrissen mit angrenzenden Einrichtungsgegenständen vermieden werden.

Der Mindestabstand zu angrenzenden Einrichtungen muss mind. 5,0 cm betragen.

Bei einem geringeren Abstand als 5,0 cm zu Wänden und Einrichtungen besteht eine Klemmgefahr.

Der Monteur bzw. Anwender trägt die Verantwortung für eine Aufstellung ohne Klemmrissen.

Bodenunebenheiten können mit den höhenverstellbaren Füßen ausgeglichen werden.

Ein fester, lotrechter Stand ist sehr wichtig.

## 5. Funktionstest

- Der Mindestabstand zu angrenzenden Wänden, Möbeln bzw. Gegenständen muss 50 mm betragen. Ansonsten besteht erhöhte Klemmgefahr.
- Überprüfen Sie die Standfestigkeit. Wenn nötig justieren Sie die höhenverstellbaren Füße.
- Fahren Sie den Wickeltisch komplett auf und ab. Er muss sich ohne Störgeräusche, Hindernisse und Quetschungen bewegen können. In den jeweiligen Endstellungen muss der Lift stehen bleiben.
- Stellen Sie sicher, dass keine Kabel beschädigt oder geklemmt sind bzw. die Gefahr des Einklemmens besteht.
- Wenn der Wickeltisch nicht die tiefste Position erreicht, muss ein Reset durchgeführt werden. Fahren Sie den Tisch hierzu möglichst weit runter. Drücken Sie nun erneut die Abwärtstaste halten Sie diese gedrückt, bis der Wickeltisch die unterste Position erreicht hat.
- Modell mit Badewanne:  
Hier sind zusätzlich die Wasserzu- u. Ablaufschläuche zu kontrollieren.