

DE Fehlersuche Centerlift 6490

Produkte

CENTERLIFT 6490H

Der Centerlift 6490 ist für eine optimale Betriebssicherheit und lange Lebensdauer konstruiert. Sie ist zu erreichen, wenn der Betrieb, die Instandhaltung und die Kontrollen vorschriftsmässig durchgeführt werden. Falls es zu Problemen kommt, sehen Sie bitte zuerst unten in der Fehlersuchliste nach.

Alle Gegenstände auf oder im Centerlift müssen vor Inspektionen, Wartungen und Reparaturen entfernt werden. Fehlersuche, Wartung und Reparatur darf nur von kompetentem Personal durchgeführt werden.

Falls sich das Problem trotz unten stehender Massnahmen nicht beheben lässt, bitten wir Sie Kontakt mit einem kompetenten Techniker oder Ihrem Lieferanten aufzunehmen.

Fehler	Abhilfe
Der Centerlift 6490 bewegt sich trotz Steuerimpuls nicht	<p>Überprüfen Sie ob das Netzteil an der Steckdose angeschlossen ist.</p> <p>Überprüfen Sie den korrekten Anschluss der Kabel am Steuerungstaster.</p> <p>Versuchen Sie das System zurückzusetzen, in dem Sie den Abwärtstaster für ca. 5 Sek. gedrückt halten. Der Reset ist erfolgreich wenn Sie ein Klicken im Steuergerät hören. Fahren Sie den Lift nun in seine Endstellung.</p>
Der Centerlift 6490 bewegt sich trotz Steuerimpuls nicht, in der Steuerbox ist ein 3-faches Klicken zu hören	<p>Der Centerlift 6490 hat den Klemmschutz nicht erkannt.</p> <p>Überprüfen Sie ob die Klemmschutzleiste intakt und angeschlossen ist. Wenn der Lift mit mehreren Klemmschutzeinrichtungen ausgestattet ist, überprüfen Sie bitte die Verbindungen.</p>
Der Centerlift 6490 steht schräg, da die Motoren unterschiedlich ausgefahren sind	<p>Führen Sie eine Synchronisation der Motoren durch. Fahren Sie den Lift in die unterste Position. Drücken Sie nun erneut die Abwärtstaste und halten Sie diese gedrückt bis die Motoren sich neu ausgerichtet haben</p>