

## **DE** Fehlersuche InDiago 510

### Produkte

InDIAGO

---

Der Oberschranklift InDiago 510 ist für eine optimale Betriebssicherheit und lange Lebensdauer konstruiert. Sie ist zu erreichen, wenn der Betrieb, die Instandhaltung und die Kontrollen vorschriftsmäßig durchgeführt werden. Falls es zu Problemen kommt, sehen Sie bitte zuerst unten in der Fehlersuchliste nach.

Vor Inspektionen, Wartungen und Reparaturen müssen alle Lasten entfernt werden. Die Arbeiten dürfen nur von Fachkräften vorgenommen werden.

Fehler	Abhilfe
<b>Der Lift bewegt sich trotz Steuerimpuls nicht</b>	Hat die Steckdose Strom? Ist der Netzstecker angeschlossen? Ist die Klemmschutzplatte gedrückt? Kontrolle der Kabel am Taster, bzw. der Batterie bei Fernbedienungen.