

## DE Fehlersuche Motorisch höhenverstellbare Waschtische

### Produkte

BASICLINE 415  
 BASICLINE 433 - Mit Spiegel und Beleuchtung  
 DESIGNLINE 417 - Mit Spiegel und Beleuchtung

Die Waschtischlifte sind für eine optimale Betriebssicherheit und lange Lebensdauer konstruiert. Sie ist zu erreichen, wenn der Betrieb, die Instandhaltung und die Kontrollen vorschriftsmäßig durchgeführt werden. Sollte es dennoch zu Problemen kommen, sehen Sie bitte zuerst unten in der Fehlersuchliste nach.

Vor den Arbeiten sind sämtliche Gegenstände vom Waschtisch zu entfernen. Die Fehlersuche, Wartung und Reparatur darf nur von kompetenten Personen durchgeführt werden.

Sollte sich das Problem trotz unten stehender Maßnahmen nicht beheben lassen, so kontaktieren Sie bitte einen kompetenten Techniker bzw. Ihren Lieferanten.

Fehler	Abhilfe
<b>Waschtischlift reagiert nicht auf die Steuerung</b>	<p>Kontrolle der Sicherung und der Stromanschlüsse.</p> <p>Ist der Netzstecker korrekt angeschlossen?</p> <p>Falls der Lift sich noch immer nicht bewegt, rufen Sie einen kompetenten Monteur oder Ihren Lieferanten.</p> <p>Der Monteur muss als erste Maßnahme die obigen Punkte kontrollieren. Des weiteren ist zu prüfen, ob alle Kabel angeschlossen und unbeschädigt sind. Das Licht auf dem Steuergerät muss grün leuchten.</p> <p>Falls nicht, ist sehr wahrscheinlich das Steuergerät defekt. Ein Ersatz ist bei Granberg zu bestellen</p>
<b>Der Klemmschutz (Zubehör) funktioniert nicht</b>	<p>Überprüfen Sie ob die Kabel vom Klemmschutz am Lift angeschlossen sind.</p>