

DE Fehlersuche Höhenverstellbare Wickeltische

Produkte

Wickeltisch 332
 Wickeltisch 332 - mit Waschbecken
 Wickeltisch 333
 Wickeltisch 333 - mit Waschbecken
 Wickeltisch 334
 Wickeltisch 334 - mit Waschbecken
 Wickeltisch 335
 Wickeltisch 335 - mit Waschbecken

Der Wickeltisch ist für eine optimale Betriebssicherheit und lange Lebensdauer konstruiert. Um diese zu gewährleisten ist es wichtig, dass der Tisch vorschriftsmäßig eingesetzt wird und alle Wartungen gemäß der Anleitung durchgeführt werden. Sollte es dennoch zu Problemen kommen, kann Ihnen die nachstehende Tabelle helfen.

Vor Beginn der Wartung bzw. Fehlersuche sind alle Gegenstände und Lasten vom Wickeltisch zu entfernen.

Fehlersuche, Wartung oder Reparatur darf nur von kompetenten Personen durchgeführt werden.

Fall sich das Problem trotz unten stehender Maßnahmen nicht beheben lässt, so nehmen Sie bitte Kontakte mit Ihrem Lieferanten auf.

Fehler	Abhilfe
<p>Der Tisch bewegt sich trotz gedrücktem Taster nicht</p>	<p>Stellen Sie sicher, dass der Lift ans Stromnetz angeschlossen ist und alle Kontakte verbunden sind.</p> <p>Prüfen Sie alle Kabel auf evtl. vorhandene Schäden.</p> <p>Wickeltisch 334: Prüfen Sie, ob das Kabel des Klemmschutzes und das Bedienteil korrekt an den Lift angeschlossen sind.</p> <p>Halten Sie die Taste für die Abwärtsbewegung mindestens 20 Sekunden lang gedrückt. Nach einem Klickgeräusch von der Steuereinheit können Sie die Taste loslassen und den Tisch probeweise hochfahren. Wenn dies keine Abhilfe schafft, wiederholen Sie den Vorgang mit der Taste für die Aufwärtsbewegung.</p>
<p>Der Wickeltisch fährt nicht bis nach ganz unten</p>	<p>Fahren Sie den Wickeltisch so weit wie möglich runter.</p> <p>Drücken Sie nun nochmal die Abwärtstaste und halten Sie diese ca. 5 Sek. lang gedrückt, bis der Tisch sich weiter nach unten bewegt. Halten Sie die Taste gedrückt bis der Wickeltisch seine Endposition erreicht hat. Das System ist nun zurückgesetzt. Die Ursache könnten z. B. ein Stromausfall gewesen sein.</p>