

## DE Fehlersuche Höhenverstellbare Pflege- u. Duschliegen

### Produkte

Wickeltisch 343  
 Wickeltisch 343 - mit Babywanne  
 Pflegeliege 345  
 Duschliege 346

Der Wickel- u. Pflgetisch ist für eine optimale Betriebssicherheit und lange Lebensdauer konstruiert. Um diese zu gewährleisten ist es wichtig, dass der Tisch vorschriftsmäßig eingesetzt wird und alle Wartungen gemäß der Anleitung durchgeführt werden. Sollte es dennoch zu Problemen kommen, kann Ihnen die nachstehende Tabelle helfen.

Vor Beginn der Wartung bzw. Fehlersuche sind alle Gegenstände und Lasten vom Wickel- u. Pflgetisch zu entfernen.

Fehlersuche, Wartung oder Reparatur darf nur von kompetenten Personen durchgeführt werden.

Fall sich das Problem trotz unten stehender Maßnahmen nicht beheben lässt, so nehmen Sie bitte Kontakte mit Ihrem Lieferanten auf.

Fehler	Abhilfe
<b>Der Tisch bewegt sich trotz gedrücktem Taster nicht</b>	Stellen Sie sicher, dass der Lift ans Stromnetz angeschlossen ist und alle Kontakte verbunden sind.  Prüfen Sie alle Kabel auf evtl. vorhandene Schäden.
<b>Die Hubsäulen fahren nicht parallel</b>	Falls die Motoren unterschiedliche Höhen aufweisen, muss eine Synchronisation durchgeführt werden.  Hierzu ist der Abwärtstaster ca. 5 Sek. zu drücken bis ein Klicken zu hören ist. Nun werden die Motoren synchronisiert und der Tisch ist wieder betriebsbereit.